Набор для удаления имплантата

EFR KIT

- Простое и быстрое удаление имплантата в 2 этапа
- · Минимальная потеря прилегающей кости при удалении имплантата
- Процент успешных удалений более 90%



1. Выбрать винт для удаления имплантата (См. инструкцию по выбору винта)



2. Зафиксировать винт для удаления имплантата по часовой стрелке с помощью ключа для фиксации винтов N/F (сила торка для платформы мини = 80Hcм, стандарт = 100Hcм)



3. Прочно зафиксировав инструмент в имплантате, отсоединить ключ для фиксации Винта N/F



4. Соединить инструмент для удаления имплантата к винту N/F против часовой стрелки



5. Продолжить вращение против часовой стрелки с помощью динамометрического ключа (максимум 400Нсм)



 Прочная фиксация имплантата с инструментом для удаления имплантата дает возможность удалить имплантат с минимальной потерей прилегающей кости

Выбор Винта для удаления имплантата




Набор для удаления винта

ESR KIT


- · Простое решение для удаления сломанного винта в 2 этапа
- · Процент успешных удалений сломанного винта = 90%



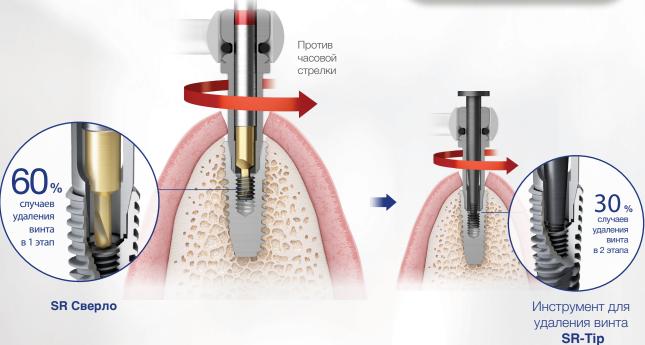

Варианты решения возможных проблем с протетикой



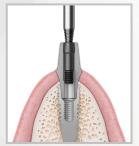

В случае стирания шестигранника на винте



AR tip (Мини) Инструмент для удаления абатмента



В случае нарушения внутренней резьбы



Re-tap Метчик повторной резьбы

