

Рекомендации по установке имплантатов

Выбор диаметра имплантата

Для максимально успешного результата имплантации, следуйте указаниям производителя и подбирайте диаметр имплантата в зависимости от плотности костной ткани и размера зуба.



Кость средней плотности

- Дистальный отдел: TSIII $\geq$ $\varnothing$ 4.5
- Фронтальный отдел нижней челюсти: TS $\varnothing$ 3.0

При горизонтальной атрофии костной ткани

- Имплантаты узкого диаметра TS $\varnothing$ 3.0

При вертикальной атрофии костной ткани

- Короткие имплантаты длиной 6 мм
- Установка мостовидной конструкции после периода заживления

- * При необходимости — выбрать имплантаты $\varnothing$ 6.0/7.0 в дистальном отделе
- * Сила торка при имплантации: $\leq$ 40Нсм

Выбор финальной фрезы

- **Тип костной ткани D3 (мягкая):** Выбрать фрезу на 0.5 мм меньше диаметра имплантата
- **Тип костной ткани D2 (средняя плотность):** Выбрать фрезу по диаметру имплантата
- **Тип костной ткани D1 (плотная):** Выбрать фрезу на 0.5 мм больше диаметра имплантата

* Применимо к хирургическому набору 122 Kit

Ирригация

- Препарирование ложа имплантата должно сопровождаться ирригацией охлажденным физраствором
- Перед непосредственной установкой имплантата рекомендуется промыть его в физрастворе во избежание воздействия бактерий ротовой полости при установке. А также промыть лунки от попавшей внутрь слюны

Выбор Формирователя десны


Выбирайте в соответствии с диаметром будущего абатмента и толщины мягких тканей пациента

* Не используйте для повторного применения

Таблица соответствия

Высота ФДМ (Н)	3.0	4.0	5.0	7.0
Абатмент (высота десны G/H)	1.0	2.0/3.0	3.0/4.0	5.0
Высота слепочного модуля (Короткий / длинный)	Короткий	Короткий	Длинный	Длинный

Толщина стенок имплантатов TS

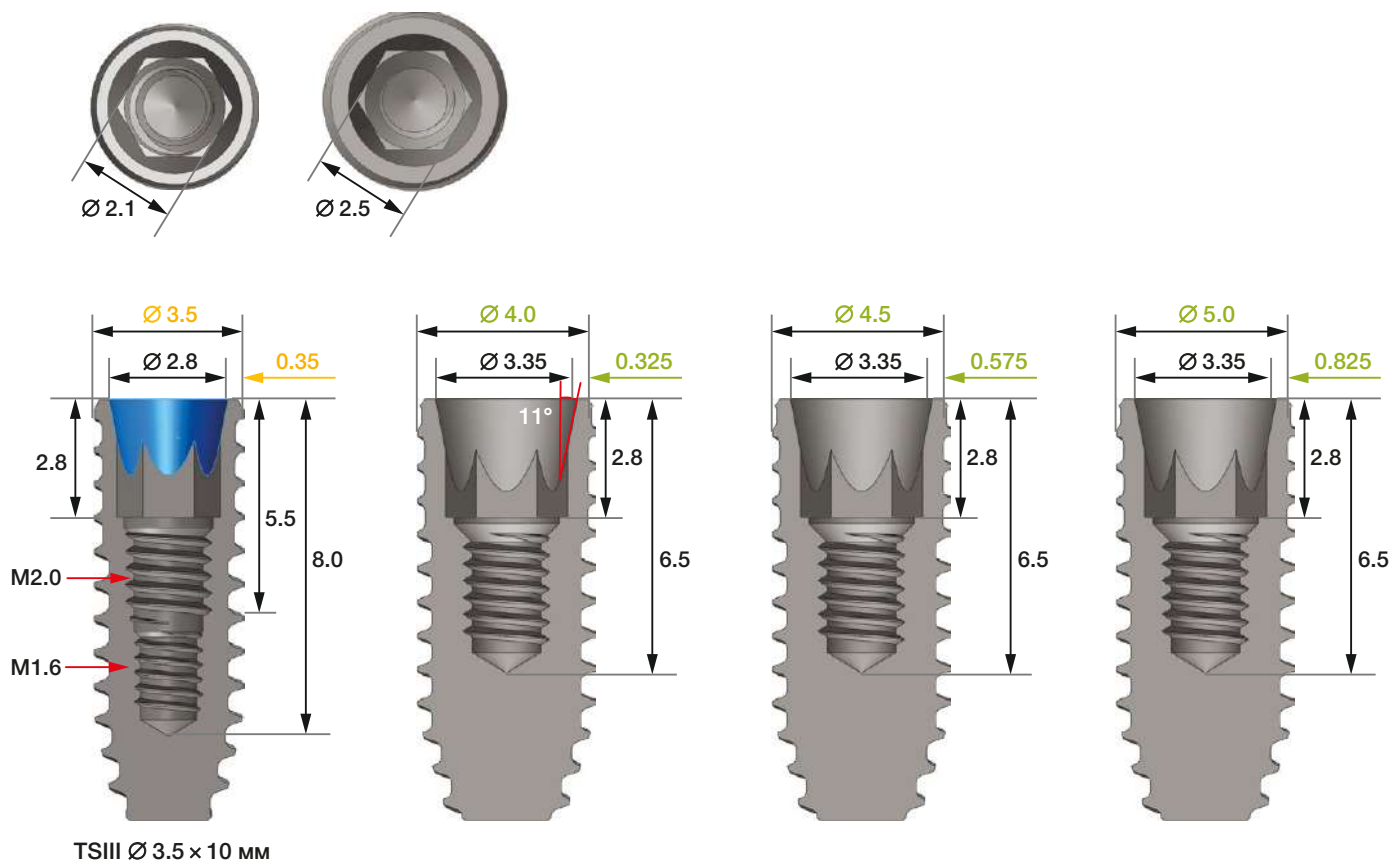


Хирургический протокол 122 Taper kit

Хирургический протокол **122 Taper Kit**

TSIII CA/SA


(Длина : 10 мм)

Ø 3.0 мм

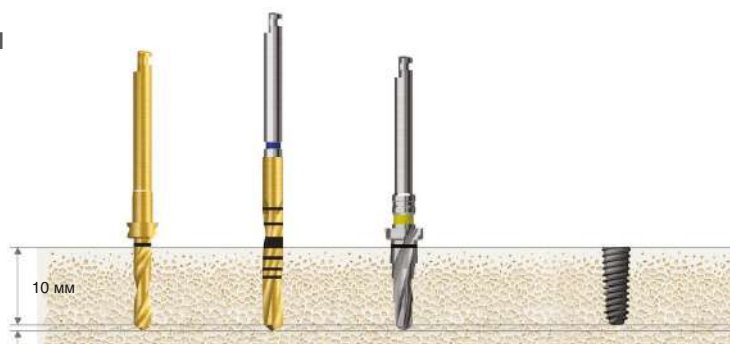


Тип кости	Ø2.2 Сверло	Ø2.7 Сверло	Сверло Тарег Ø3.5	Ø3.0 Имплантат
Мягкая	►			Установка имплантата
Нормальная	►	►		
Твердая	►		►	

Ø 3.5 мм

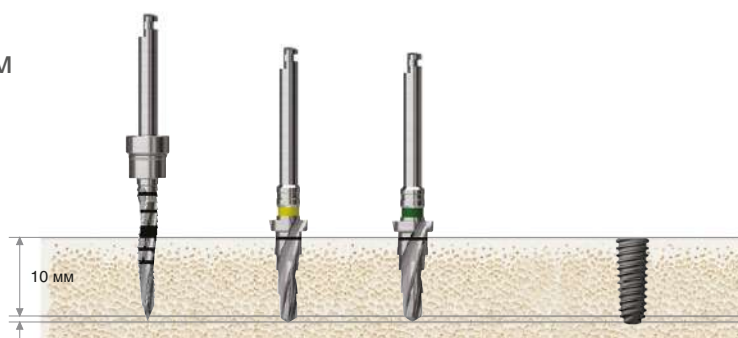


Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Тарег Ø3.5	Сверло Тарег Ø4.0	Ø3.5 Имплантат
Мягкая	►			Установка имплантата
Нормальная	►	►		
Твердая	►	►	►	

Ø 4.0 мм

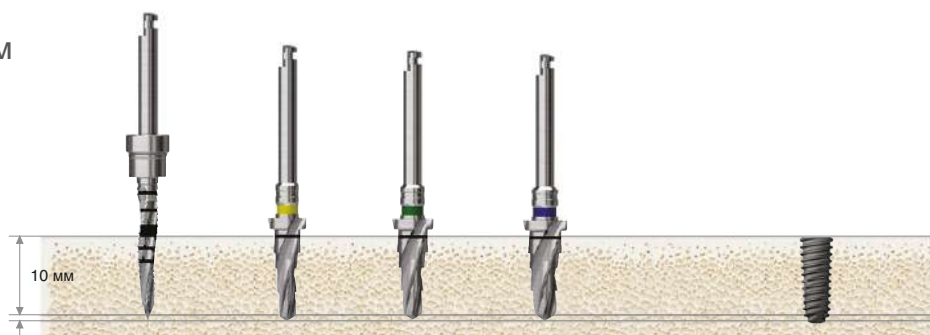


Тип кости	Пилотное сверло	Сверло Тарег Ø3.5	Сверло Тарег Ø4.0	Сверло Тарег Ø4.5	Ø4.0 Имплантат
Мягкая	►	►			Установка имплантата
Нормальная	►	►	►		
Твердая	►	►		►	


Ø 4.5 мм

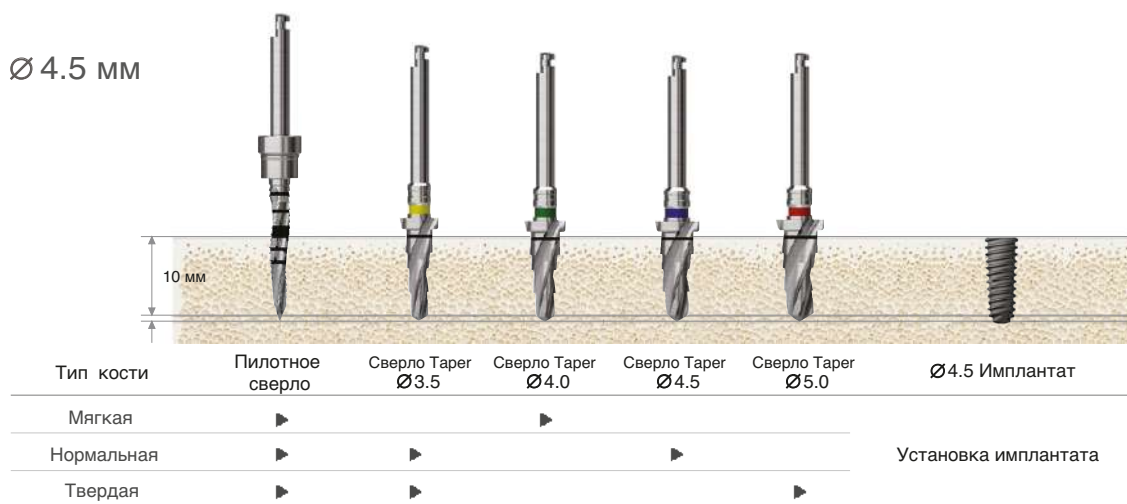

Ø 5.0 мм

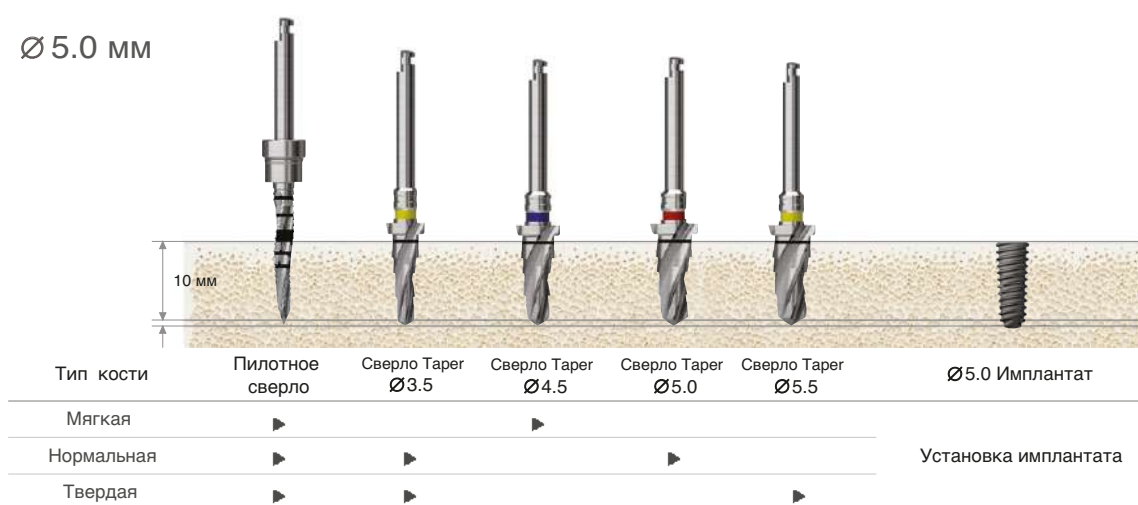

Ø 5.5 мм

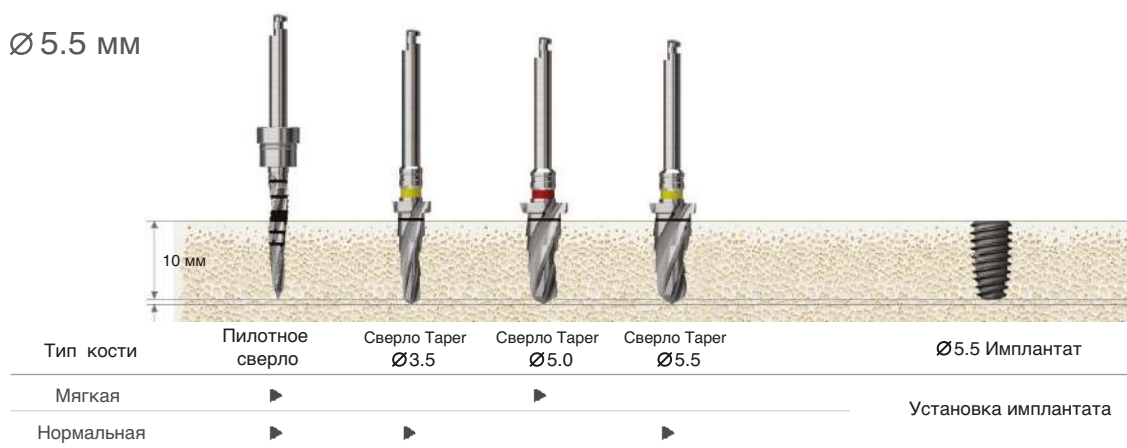

- При установке имплантатов Ø 5.0 в случае высокой плотности костной ткани – после Конического сверла 5.0 использовать Коническое сверло 5.5
- Рекомендуемый крутящий момент при установке имплантата: менее 40 Нсм
- Рекомендации по установке имплантатов TS
 - В случае костной ткани высокой и средней плотности установить имплантат на 1–2 мм субкостально
 - В случае мягкой плотности костной ткани разместить имплантат на уровне кости