

Индивидуальный абатмент идеально подходит для систем имплантатов TS и Hiossen

Pre-milled Абатмент

- Титановая заготовка для изготовления индивидуальных абатментов с применением CAD/CAM систем.
- Основание Premilled абатментов Osstem изготовлено заранее и идеально подходит имплантатам производства Osstem и Hiossen.
- Используется для изготовления индивидуального абатмента из титана на фрезерном оборудовании Arum или Zirkonzahn.

Отличительный знак Оригинальной продукции

Проверьте оригинальность
продукта по наличию отметки


Проверка подлинности
после завершения
процесса фрезеровки

Индивидуальный
абатмент до
фрезеровочных работ




Точное и надежное соединение


- Использование оригинальной продукции гарантирует точность и надежность соединения
- Использование неоригинальной продукции приводит к выкручиванию винта и поломке абатмента

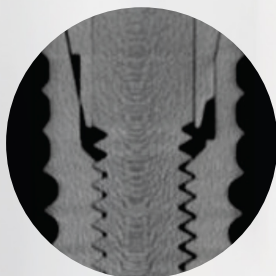


Неоригинальный
абатмент

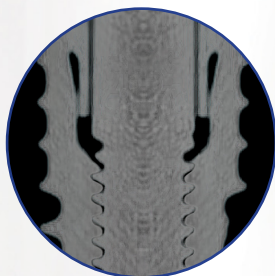


Оригинальный
абатмент

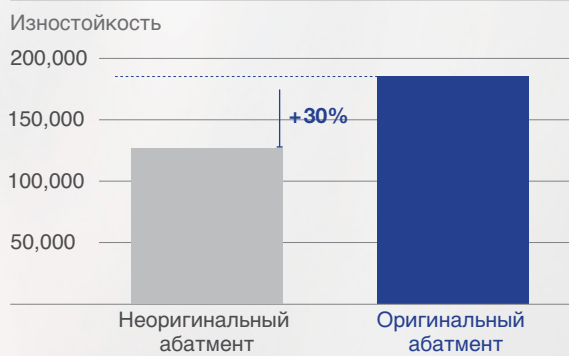

Протокол работы

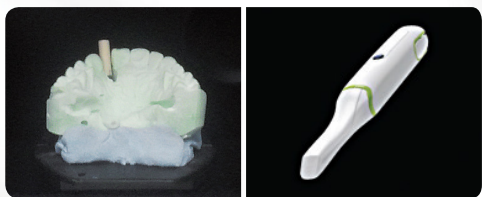

Сканирование

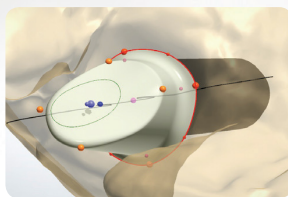


Дизайн абатмента в специальном Программном Обеспечении




Соединить заготовку абатмента Pre-milled и фиксатор фрезерного станка



Зафиксировать заготовку в холдере, установить в фрезерный станок

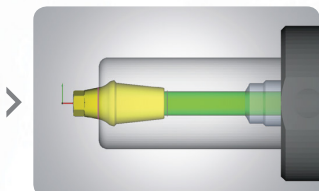

Изготовление абатмента с системой CAD/CAM

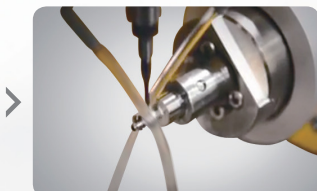

Фрезеровка абатмента Pre-milled



Готовый абатмент

Линейка продукции

Фрезеровочное оборудование Agum

	6-гран.	Не 6-гран.
Мини	TSPM10ARMWH	TSPM10ARMNWH
Стандарт	TSPM10ARRWH	TSPM10ARRNWH

Фрезеровочное оборудование Zirkonzahn

	6-гран.	Не 6-гран.
Мини	TSPM10ZKMWH	TSPM10ZKMNWH
Стандарт	TSPM10ZKRWH	TSPM10ZKRNWH

Граница фрезеровки

